


Prueba de glucosa en sangre para perros y gatos

GUÍA RÁPIDA DE REALIZACIÓN DE PRUEBA DE GLUCOSA


Obtención de la muestra de sangre

1

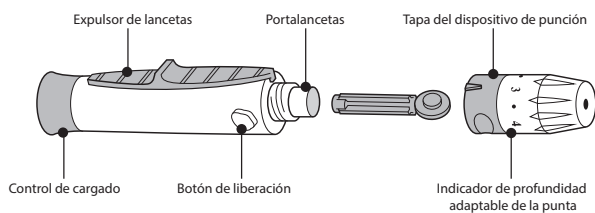


Familiarícese con el dispositivo de punción iPet PRO.

2

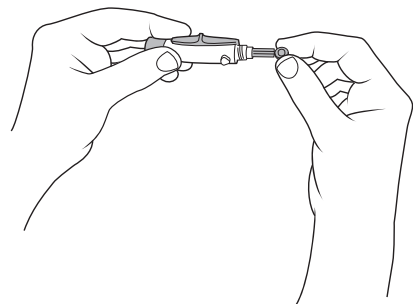


Inserte una lanceta nueva en el portalancetas y empújela hasta que se detenga por completo. Gire y retire la tapa protectora de la lanceta (consérvela, porque la necesitará al desechar la lanceta) y vuelva a colocarla en su sitio.

3

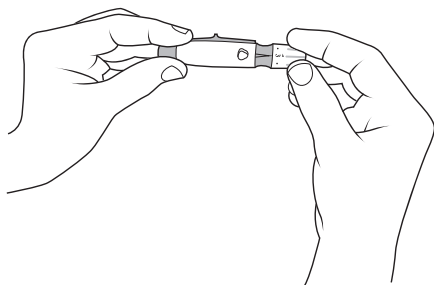

Ajuste el indicador de profundidad adaptable de la punta hasta llegar a un nivel cómodo de penetración. Comience en el ajuste 3 y aumentelo a un número más alto según sea necesario.

4

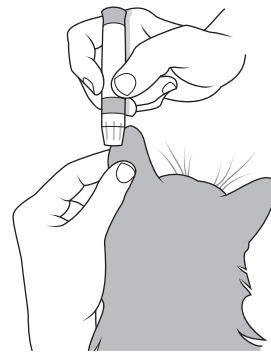


Ponga el dispositivo de punción en la pata o la vena marginal de la oreja del animal, luego presione el botón de liberación para obtener una muestra de sangre.

SUGERENCIA: Para aumentar el flujo de sangre, entibie la oreja masajeándola o poniéndole una compresa seca tibia.



Realización de una prueba de glucosa en sangre

1

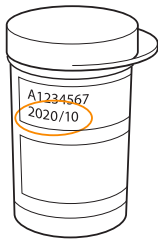

Revise la fecha de caducidad indicada en el frasco de las tiras reactivas. No use tiras reactivas una vez transcurrida la fecha de vencimiento.

2



Extraiga una tira reactiva del frasco y cierre la tapa herméticamente.

3




Inserte la tira reactiva en el medidor (en la dirección de la flecha) hasta que éste emita un pitido.

4



Aparecerá un código numérico y luego un icono destellante. Presione la flecha ascendente o descendente para seleccionar el indicador de comida. Por omisión, la pantalla no muestra el indicador de comida.

5

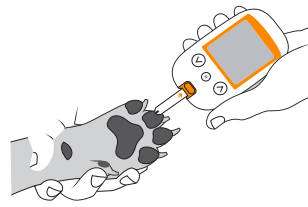

Ponga la gota de sangre en contacto con el extremo de la tira reactiva.

6




Una vez que haya suficiente sangre en la tira reactiva, el medidor emitirá el pitido y comenzará una cuenta regresiva.

7




Al cabo de 5 segundos la pantalla muestra el resultado de la prueba.

8

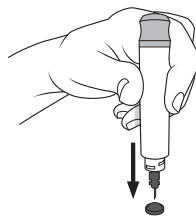

Retire la tapa del dispositivo de punción. Presione la aguja de la lanceta expuesta en la tapa protectora de la lanceta (que se había quitado anteriormente para exponer la aguja).

9

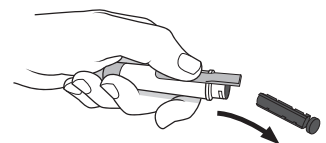

Expulse la lanceta del portalancetas empujando el expulsor de lancetas hacia adelante. Deseche la lanceta en un recipiente a prueba de perforaciones.



Para hacer pedidos, envíe un mensaje por correo electrónico a JGlobal en jordi@jglobal.com.es o llame al 637551254.

Esta información se proporciona con fines educativos y no pretende sustituir el asesoramiento médico. Consulte con su veterinario a fin de obtener instrucciones específicas para manejar y monitorear la diabetes de su mascota.

© 2017 UltiMed, Inc. iPet™ PRO es una marca registrada de UltiMed, Inc. iPet PRO cumple la más reciente norma de exactitud ISO 15197:2013.

V015-041817C/REV.0/2017-04