

Jordi Gimeno

Pet Care & Consulting

Mi objetivo es **aportar estrategias y soluciones a los veterinarios para incrementar la rentabilidad de sus negocios.**



vetsuture®
P R E M I U M

Una completa gama de suturas veterinarias

iPet™ PRO
Blood Glucose Monitoring System

Control rápido y fiable de los niveles de glucosa en sangre

Vet+Aid™

Manejo holístico de afecciones de piel y pelo

v-gel®

Dispositivos supraglóticos



Jordi Gimeno

Pet Care & Consulting

Apreciado Veterinario,

Ya son más de 30 años de experiencia en el sector de clínicas veterinarias de animales de compañía. En 2013 decidí cambiar de rumbo profesional y empezar un nuevo proyecto: ser tu socio. Un socio que te aporte, no sólo productos de calidad y valor añadido sino, además, un servicio de consultoría que te ayude a optimizar y rentabilizar mejor tu negocio.

Pongo a disposición del colectivo veterinario toda mi experiencia y conocimientos, avalados por una dilatada experiencia que me ha llevado a visitar más de 4.000 clínicas veterinarias a lo largo y ancho de los 5 continentes.

Apuesto firmemente por crecer contigo, y en ello pongo todo mi esfuerzo y conocimientos. Trabajar juntos te aportará un beneficio doble, ya que nos convertiremos en **una de las mejores herramientas para tu negocio.**

Te invito a leer lo que publico periódicamente en mi blog www.jordigimeno.com

Un saludo

Jordi Gimeno
Veterinario



Índice

- 3 Vetsuture
- 10 VetAid
- 12 iPet PRO
- 14 v-gel® Advanced
- 18 Consultoría



vetsuture®
PREMIUM

Suturas quirúrgicas veterinarias

Alta calidad. Bajo coste.

	NYLON	LENE	NEXT	BOND	SILK	PGLA	fastPGLA	PGC	PDX
	Monofilamento Poliamida	Monofilamento Polipropileno	Monofilamento Polifluoruro de Vinilideno Azul	Hilo trenzado recubierto Poliester Verde	Hilo trenzado recubierto Seda Negro	Hilo trenzado recubierto - Ácido Poliglicólico y Ácido Láctico Violeta	Hilo trenzado recubierto - Ácido Poliglicólico y Ácido Láctico Sin tinte	Monofilamento Poliglecaprona 25	Monofilamento Polidioxanona
Color	Negro	Azul	Azul	Verde	Negro	Violeta	Sin tinte	Violeta	Violeta
¿Absorbible?	No absorbible	No absorbible	No absorbible	No absorbible	No absorbible	Reabsorción a medio plazo 30 días 60-90 días	Reabsorción rápida 10 días 42 días	Reabsorción a medio plazo 20 días 90 días	Reabsorción lenta 60 días 180-210 días
Soporte de la herida Absorción									
Indicaciones									
Suturas y ligaduras para cirugía general			✓			✓		✓	✓
Músculos y aponeurosis			✓			✓		✓	✓
Ligadura de hemostasis						✓		✓	✓
Suturas musculares y subcutáneas						✓		✓	✓
Tejidos de acceso difícil							✓	✓	✓
Suturas cutáneas para animales difíciles							✓	✓	
Tejidos frágiles								✓	✓
Piel	✓	✓	✓	✓				✓	✓
Ojo	✓	✓			✓	✓	✓		
Hernias		✓	✓						✓
Ortopedia		✓	✓	✓					
Suturas de paredes		✓	✓			✓			
Suturas para tejidos de cicatrización lenta		✓	✓						
Ventajas									
Resistencia a la tracción	Alta	Muy Alta	Extrema	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta
Reacción de los tejidos	Baja	Muy baja	Ninguna	Muy baja	Muy baja	Muy baja	Muy baja	Muy baja	Muy baja
Efecto mecha / Capilaridad	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Limitada (recubierta)	Limitada (recubierta)	Limitada (recubierta)	Limitada (recubierta)	Ausencia	Ausencia
Memoria de forma	Baja	Baja	Muy baja	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Baja	Baja
Firmeza del nudo	Alta	Muy Alta	Excelente	Alta	Alta	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Deslizamiento	Sí	Sí	Excepcional	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Efecto sierra en el tejido	Nulo	Nulo	Nulo	Limitada (recubierta)	Limitada (recubierta)	Limitada (recubierta)	Limitada (recubierta)	Nulo	Nulo



vetsuture®
PREMIUM


Aguja fire^{3D}

- Acero inoxidable de tipo 300: más dúctil y menos traumático
- Tecnología de pulido láser para un mejor filo y mejor ajuste del diámetro de la aguja al calibre del hilo.
- Perfecta penetración en los tejidos con un menor trauma.
- Mayor durabilidad del filo que conlleva un menor esfuerzo del cirujano.

Pack "Tear Notch"

- 100% Aluminio, impermeable a los gases y a la humedad
- Material con barrera microbiológica y fúngica
- Esterilización por Rayos Gamma: mejor trato del hilo, sin residuos y uniforme lote a lote
- Fácil apertura
- Etiqueta más grande para mejor identificación

Aguja Triangular 30mm 3/8
Fuerza de penetración en g

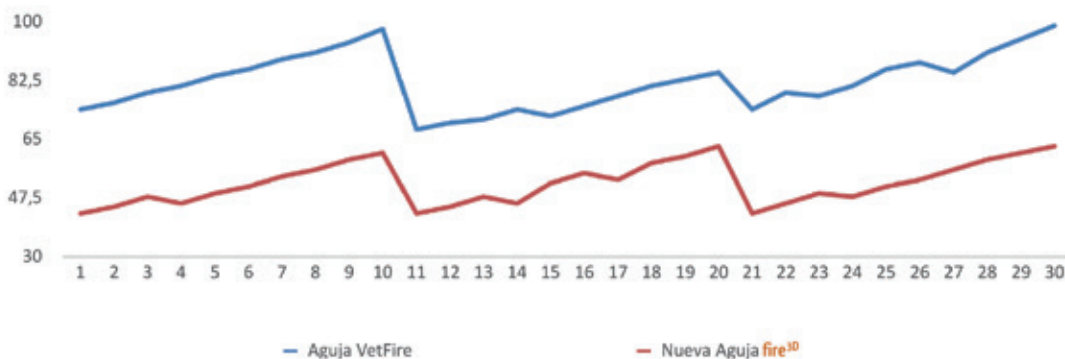

— Aguja VetFire

— Nueva Aguja fire^{3D}

Disponibles desde
Enero 2018

Nuevas suturas



NOTA:

La gráfica indica que, debido al mejor y más fino filo de la aguja fire^{3D}, el cirujano debe hacer menos fuerza para penetrar los tejidos. Al mismo tiempo, la durabilidad del filo es muy superior en las nuevas agujas fire^{3D}

Eje Y: gramos de fuerza

Eje X: número de pasadas por aguja (series de 10 pasadas por el tejido)

NYLON

Monofilamento de Poliamida

metric EP (USP)	aguja y longitud de hilo	referencia
1 5/0	AGUJA TRIANGULAR 13mm	90cm NYL1CN
1.5 4/0	AGUJA TRIANGULAR 19mm	90cm NYL15CN
2 3/0	AGUJA TRIANGULAR 24mm	90cm NYL2CN
2 3/0	AGUJA TRIANGULAR TS RECTA - 50mm	90cm NYL2SN
3 2/0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm NYL3CN
3 2/0	AGUJA TRIANGULAR TS RECTA - 50mm	90cm NYL3SN
3.5 0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm NYL35CN
4 1	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm NYL4CN
4 1	AGUJA TRIANGULAR TS RECTA - 50mm	90cm NYL4SN

LENE

Monofilamento de Polipropileno

metric EP (USP)	aguja y longitud de hilo	referencia
1 5/0	AGUJA TRIANGULAR 13mm	90cm LENE1CN
1.5 4/0	AGUJA TRIANGULAR 19mm	90cm LENE15CN
2 3/0	AGUJA TRIANGULAR 24mm	90cm LENE2CN
3 2/0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm LENE3CN
3.5 0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm LENE35CN
5 2	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 40mm	90cm LENESDTC

NEXT

Monofilamento de Fluoruro de Polivinilideno

metric EP (USP)	aguja y longitud de hilo	referencia
2 3/0	AGUJA TRIANGULAR 24mm	90cm NEXT2CN
3 2/0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm NEXT3CN
4 1	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm NEXT4CN

BOND

Poliéster trenzado y recubierto

metric EP (USP)	aguja y longitud de hilo	referencia
2 3/0	AGUJA TRIANGULAR 24mm	90cm BOND2CN
3 2/0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm BOND3CN
6 3+4	AGUJA TRIANGULAR 40mm	90cm BOND6CN

SILK

Seda trenzada y recubierta

metric EP (USP)	aguja y longitud de hilo	referencia
1.5 4/0	AGUJA TRIANGULAR 19mm	90cm SILK15CN
2 3/0	AGUJA TRIANGULAR 24mm	90cm SILK2CN
3 2/0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm SILK3CN
3.5 0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm SILK35CN
4 1	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm SILK4CN

PGLAÁcido Poliglicólico y Ácido Láctico trenzado y recubierto			
metric EP (USP)	aguja y longitud de hilo		referencia
0.7 6/0	AGUJA TRIANGULAR 13mm	45cm	PGLA07CN
1 5/0	AGUJA TRIANGULAR 13mm	90cm	PGLA1CN
1 5/0	AGUJA CÓNICA 19mm	90cm	PGLA1RN
1.5 4/0	AGUJA TRIANGULAR 19mm	90cm	PGLA15CN
1.5 4/0	AGUJA CÓNICA 19mm	90cm	PGLA15RN
2 3/0	AGUJA TRIANGULAR 24mm	90cm	PGLA2CN
2 3/0	AGUJA CÓNICA 24mm	90cm	PGLA2RN

PGLAÁcido Poliglicólico y Ácido Láctico trenzado y recubierto			
metric EP (USP)	aguja y longitud de hilo		referencia
3 2/0	AGUJA TRIANGULAR ½ 26mm	90cm	PGLA3DCN
3 2/0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm	PGLA3CN
3 2/0	AGUJA CÓNICA 30mm	90cm	PGLA3RN
3.5 0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm	PGLA35CN
3.5 0	AGUJA CÓNICA 30mm	90cm	PGLA35RN
4 1	AGUJA TRIANGULAR 40mm	90cm	PGLA4CN
5 2	AGUJA TRIANGULAR ½ 48mm	90cm	PGLA5CN

fastPGLAÁcido Poliglicólico trenzado y recubierto			
metric EP (USP)	aguja y longitud de hilo		referencia
1 5/0	AGUJA TRIANGULAR 13mm	90cm	FPGLA1CN
1.5 4/0	AGUJA TRIANGULAR 19mm	90cm	FPGLA15CN
2 3/0	AGUJA TRIANGULAR 24mm	90cm	FPGLA2CN
3 2/0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm	FPGLA3CN

PGCMonofilamento de Poligecaprona 25			
metric EP (USP)	aguja y longitud de hilo		referencia
1 5/0	AGUJA TRIANGULAR 13mm	90cm	PGC1CN
1 5/0	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 13mm	90cm	PGC1TC
1.5 4/0	AGUJA TRIANGULAR 19mm	90cm	PGC15CN
1.5 4/0	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 18mm	90cm	PGC15TC
1.5 4/0	AGUJA CÓNICA 1/2 19mm	90cm	PGC15DRN
2 3/0	AGUJA TRIANGULAR 26mm	90cm	PGC2DCN
2 3/0	AGUJA TRIANGULAR 24mm	90cm	PGC2CN
2 3/0	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 20mm	90cm	PGC2TC
2 3/0	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 1/2 26mm	90cm	PGC2DTC
2 3/0	AGUJA CÓNICA 1/2 26mm	90cm	PGC2DRN

PGCMonofilamento de Poligecaprona 25			
metric EP (USP)	aguja y longitud de hilo		referencia
3 2/0	AGUJA TRIANGULAR 1/2 26mm	90cm	PGC3DCN
3 2/0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm	PGC3CN
3 2/0	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 20mm	90cm	PGC3CT
3 2/0	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 1/2 26mm	90cm	PGC3DTC
3 2/0	AGUJA CÓNICA 1/2 26mm	90cm	PGC3DRN
3.5 0	AGUJA TRIANGULAR 1/2 30mm	90cm	PGC35DCN
3.5 0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm	PGC35CN
4 1	AGUJA TRIANGULAR 40mm	90cm	PGC4CN

PDXMonofilamento de Polidioxanona			
metric EP (USP)	aguja y longitud de hilo		referencia
1 5/0	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 13mm	90cm	PDX1TC
1.5 4/0	AGUJA TRIANGULAR 1/2 19mm	90cm	PDX15DRC
1.5 4/0	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 18mm	90cm	PDX15TC
2 3/0	AGUJA TRIANGULAR 24mm	90cm	PDX2RC
2 3/0	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 20mm	90cm	PDX2TC
2 3/0	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 1/2 26mm	90cm	PDX2DTC
3 2/0	AGUJA TRIANGULAR 24mm	90cm	PDX3RC
3 2/0	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 20mm	90cm	PDX3TC
3 2/0	AGUJA CÓNICA PUNTA TRIANGULAR 1/2 26mm	90cm	PDX3DTC
3.5 0	AGUJA TRIANGULAR 30mm	90cm	PDX35RC
3.5 0	AGUJA TRIANGULAR 1/2 35mm	90cm	PDX35DRC
4 1	AGUJA TRIANGULAR 1/2 40mm	90cm	PDX4RC

MICRO		Suturas Oftálmicas y micro-suturas	
metric EP (USP)	aguja y longitud de hilo	referencia	
NYLON			
0.2 10/0	 2x ESPÁTULA 6.4mm 200µ - 3/8	30cm	NYL02DS
0.3 9/0	 2x ESPÁTULA 6.4mm 200µ - 3/8	30cm	NYL03DS
0.7 6/0	 2x AGUJA TRIANGULAR 10mm 250µ - 3/8	45cm	NYL07DC
PGA			
0.3 9/0 monofilamento	 2x ESPÁTULA 6.4mm 200µ - 3/8	30cm	PGA03DS
0.4 8/0	 2x ESPÁTULA 6.4mm 200µ - 3/8	30cm	PGA04DS
0.5 7/0	 2x ESPÁTULA 6.4mm 300µ - 3/8	45cm	PGA05DS
0.7 6/0	 2x ESPÁTULA 8mm 300µ - 3/8	45cm	PGA07DS



¿Necesitas más suturas?
¿Más tamaños u otras características?

Contacta con nosotros en info@jglobal.com.es
Todas las sugerencias serán tenidas en cuenta a la hora
de desarrollar nuevas referencias.

NYLON ^{cassette}		Monofilamento de Poliamida	
metric EP (USP)	longitud de hilo		referencia
3 2/0		cassette	100 _M NYL3CAS100
3.5 0		cassette	100 _M NYL35CAS100
4 1		cassette	100 _M NYL4CAS100
5 2		cassette	75 _M NYL5CAS075

PGLA ^{cassette/ carrete}		Ácido Pologlicólico trenzado y recubierto	
metric EP (USP)	longitud de hilo		referencia
2 3/0		carrete	250 _{CM} PGLA2LG
2 3/0		cassette	15 _M PGLA2CAS015
3 2/0		carrete	250 _{CM} PGLA3LG
3 2/0		cassette	15 _M PGLA3CAS015
3.5 0		carrete	250 _{CM} PGLA35LG
3.5 0		cassette	15 _M PGLA3CAS015
4 1		carrete	250 _{CM} PGLA4LG

PGLA ^{cassette/carrete}			Ácido Pologlicólico trenzado y recubierto	
metric EP (USP)	longitud de hilo		referencia	
4 1	 cassette	15m	PGLA4LCAS015	
5 2	 carrete	250cm	PGLA5LG	
5 2	 cassette	25m	PGLA5CAS025	
6 3+4	 carrete	250cm	PGLA6LG	
6 3+4	 cassette	25m	PGLA6CAS025	
7 5	 cassette	25m	PGLA7CAS025	
8 6	 cassette	25m	PGLA8CAS025	

PDX ^{cassette}			Monofilamento de Polidioxanona	
metric EP (USP)	longitud de hilo		referencia	
2 3/0	 cassette	15m	PDX2CAS015	
3 2/0	 cassette	15m	PDX3CAS015	
5 2	 cassette	25m	PDX5CAS025	
6 3+4	 cassette	25m	PDX6CAS025	

Vet+Aid™

100% NATURAL

CUIDADO COMPLETO ALTERACIONES DE LA PIEL

PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES,
AVES Y REPTILES

Los productos Vet-Aid se pueden utilizar en todo tipo de animales. Las fórmulas de Vet-Aid son soluciones isotónicas basadas en agua que utilizan las propiedades curativas de la sal marina, la lisozima y las algas marinas (en los productos de tipo espuma) para proteger y aliviar las irritaciones.

Los productos Vet-Aid están formulados para replicar los fluidos extracelulares dentro del cuerpo del animal, y ayudan a controlar las bacterias dañinas, nutriendo al mismo tiempo el desarrollo de las células dérmicas.

Lisozima

La lisozima es una enzima que se produce de forma natural en las lágrimas, la saliva y otros fluidos corporales. La función natural de la lisozima es proteger las zonas del cuerpo que puedan resultar entornos favorables para el crecimiento de bacterias.

Sal marina

La sal marina contiene más de 82 elementos y minerales esenciales para crear el entorno óptimo para la curación.

Algas marinas (espuma)

Potencia el sistema inmune, de ende contra la infección y permite obtener un menor tiempo de curación.



Aerosol enzimático de sal marina

Con lisozima

El aerosol enzimático de sal marina Vet-Aid es una solución no irritante, hipoalergénica, inodora y estéril que proporciona un alivio inmediato y tranquilizador para una amplia variedad de problemas dermatológicos. La solución salina patentada de sal marina tiene un pH equilibrado y contiene enzimas naturales para crear el entorno óptimo para la curación.

Espuma enzimática de sal marina

Con lisozima y algas marinas

La espuma enzimática de sal marina de Vet-Aid actúa como apósito líquido natural protegiendo el tejido dañado y manteniendo al mismo tiempo un entorno saludable para su curación. La espuma de sal marina ayudará a la recuperación de las condiciones dérmicas normales, aliviando a la vez la incomodidad de las irritaciones de la piel. La espuma de sal marina contiene ingredientes que son beneficiosos en el proceso de curación y favorecen el desarrollo de piel fuerte y flexible en la zona de la herida.

Instrucciones:

Agitar bien el envase. Utilizar las yemas de los dedos para aplicar suavemente la espuma en la zona afectada de la piel. Repetir este proceso de 3 a 5 veces al día o cada 5 horas.

Usos:

- Postoperatorios / heridas
- Dermatitis
- Puntos débiles
- Laceración
- Dermatitis de la lluvia
- Excrecencias carnosas

Instrucciones:

Pulverizar directamente sobre la zona afectada de 2 a 4 veces al día o cada 5 horas. Para obtener mejores resultados, permitir que la piel absorba la solución. No restregar el producto.

Usos:

- Picaduras de insectos
- Dermatitis
- Acondicionamiento del pelo y la piel
- Puntos débiles
- Muguet / pioderma
- Quemaduras solares/ ampollas en las patas
- Heridas sin secreción
- Acné / sarpullidos de la piel



PRECISIÓN EXCEPCIONAL para la medición de la glucosa

Rediseñado y mejorado para ayudarte a ofrecer una medición precisa de la glucosa

- Específicamente diseñado para medir la glucosa sanguínea en perros y gatos.
- Tecnología avanzada que detecta y corrige las fuentes de error para mejorar la exactitud.
- Analiza muestras de sangre venosa y capilar, por lo que es un instrumento eficaz para su uso en consultas y en el ámbito doméstico.




Resultados rápidos,
exactitud comprobada

Gradilla de error de consenso (Consensus Error Grid, CEG)


REJILLA DE ERRORES CONSENSUADA (CEG), %						
TOTAL	REGIÓN	A	B	C	D	E
94	Puntos	94	0	0	0	0
	CEG, %	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

La gradilla de error de consenso muestra que el 100% de los valores (94/94) se encuentra en la zona A, definida como sin efecto en la acción clínica¹.

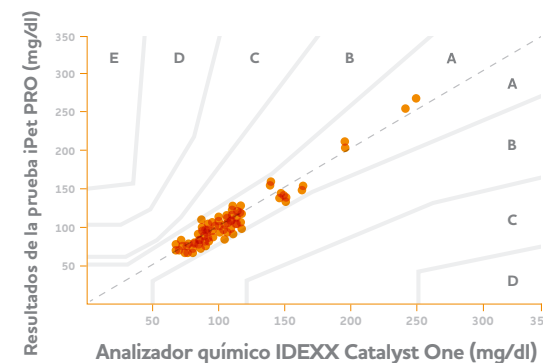

Instrucciones para la realización de una prueba de glucosa en sangre

1

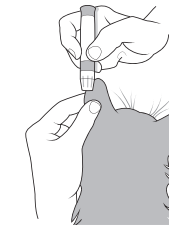


Ponga el dispositivo de punción en la pata o la vena marginal de la oreja del animal, luego presione el botón de liberación para obtener una muestra de sangre.

2



Extraiga una tira reactiva del frasco y cierre la tapa herméticamente.

3

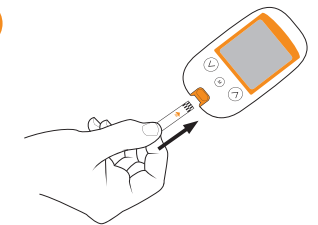

Inserte la tira reactiva en el medidor (en la dirección de la flecha) hasta que este emita un pitido.

4




Aparecerá un código numérico y luego un icono destellante. Presione la flecha ascendente o descendente para seleccionar el indicador de comida. Por omisión, la pantalla no muestra el indicador de comida.

5



Ponga la gota de sangre en contacto con el extremo de la tira reactiva.

6

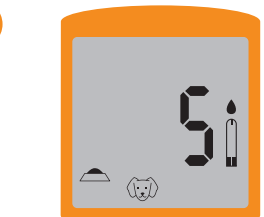


Una vez que haya suficiente sangre en la tira reactiva, el medidor emitirá el pitido y comenzará una cuenta regresiva.

7




Al cabo de 5 segundos la pantalla muestra el resultado de la prueba.

8

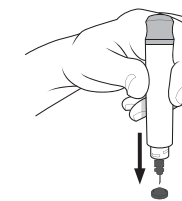

Retire la tapa del dispositivo de punción. Presione la aguja de la lanceta expuesta en la tapa protectora de la lanceta (que se había quitado anteriormente para exponer la aguja).

9

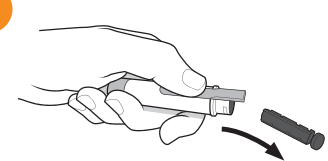

Expulse la lanceta del portalancetas empujando el expulsor de lancetas hacia adelante. Deseche la lanceta en un recipiente a prueba de perforaciones.

¹International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test system requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. 2013. ISO 15197:2013.


v-gel[®] advanced

la última generación
de dispositivos supraglóticos
para vías respiratorias
de uso veterinario

¿Qué es un dispositivo supraglótico para vías respiratorias v-gel[®]?

Los Dispositivos supraglóticos para vías respiratorias (SGAD) se utilizan comúnmente durante los procedimientos de anestesia y reanimación en seres humanos. Un dispositivo SGAD es una alternativa a los tubos endotraqueales, los cuales se utilizan para proporcionar gases anestésicos u oxígeno a pacientes anestesiados. Están diseñados para descansar sobre la faringe y evitan muchos de los problemas provocados por los tubos ET, como el trauma laríngeo y traqueal. También son fáciles y rápidos de colocar y resultan útiles para las reanimaciones de emergencia. Los dispositivos **v-gel[®]** son los primeros SGAD veterinarios específicos por especie y se utilizan actualmente en todo el mundo con gatos y conejos.

1. Conector con mínimo espacio muerto: para la conexión al circuito o a través de un capnógrafo.
2. Surcos: permiten colocar y atar el dispositivo de forma segura (a la parte trasera de la cabeza).
3. Salientes: permiten colocar el dispositivo cómodamente en su lugar.
4. Cazoleta: se ajusta en la laringe.
5. Conector esofágico.

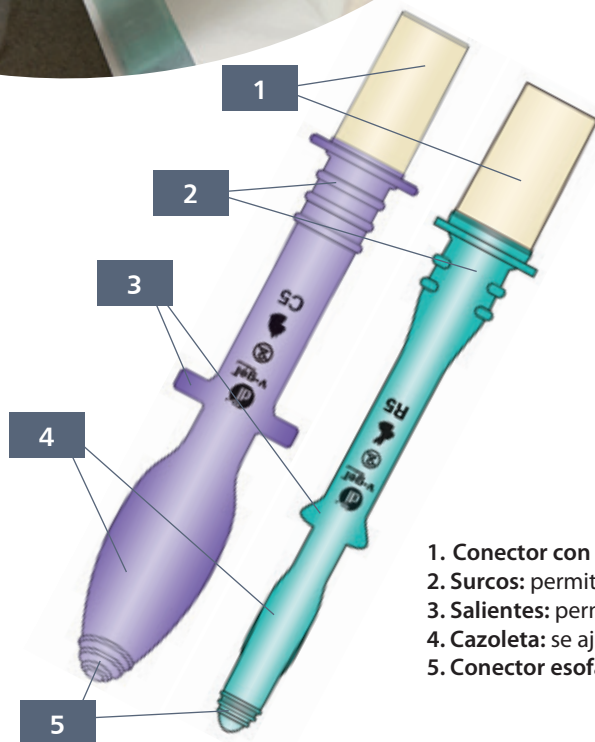


Las mismas grandes ventajas de los dispositivos v-gel[®] originales para gatos y conejos, ¡pero MEJOR!

NUEVO en v-gel[®] advanced

- Mejor diseño gracias a los años de investigación adicional por parte de nuestro equipo de I+D y las opiniones de nuestros clientes.
- Un único uso: los mismos estándares de higiene que para la medicina en seres humanos.

Además de las características de los dispositivos originales v-gel[®] para gatos y conejos

- Características anatómicas específicas combinadas con un material suave para ofrecer un sellado de presión de alta calidad.
- Ideales para pacientes ventilados y también para pacientes con respiración espontánea.
- Evitan el trauma laríngeo y traqueal, lo que implica un procedimiento de anestesia más seguro y una recuperación más cómoda para los pacientes.
- Inserciones rápidas, sencillas, seguras y sin estrés.
- Evitan las toses y los atragantamientos tras la operación.
- Baja resistencia a las vías respiratorias debido al gran canal de respiración dentro del dispositivo.
- Sellado de presión de alta calidad que restringe la fuga de agentes anestésicos volátiles, mejorando por tanto la salud y seguridad de los profesionales.
- El extremo se inserta en la parte superior del esófago para ayudar a evitar y gestionar la regurgitación del contenido del estómago.
- Recuperaciones más seguras y progresivas.
- Ideales para procedimientos dentales más seguros.
- Se adaptan a todo tipo de pacientes, incluso a los braquicéfalos.

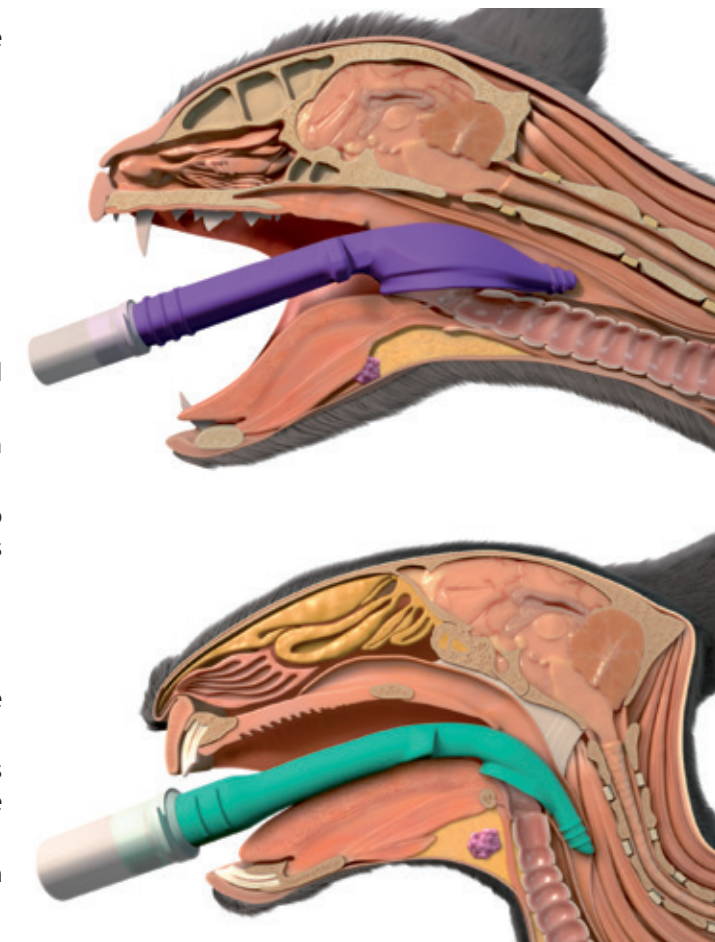



NUEVO en v-gel® para perros

- **Canal gástrico:** la inserción del tubo esofágico o gástrico ofrece una mayor protección y una mejor gestión del reflujo, la regurgitación y la aspiración.
- **Desechable:** mismos estándares de higiene que para la medicina humana.




Las mismas grandes ventajas de v-gel® para gatos y para conejos

- **Funcionalidades de adaptación anatómica** combinadas con un **material suave** para proporcionar un **sellado de presión de gran calidad**.
- Perfecto para pacientes **ventilados** y también para respiración espontánea.
- **Evita los traumatismos laríngeos y traqueales**, lo que implica una **anestesia más segura** y una recuperación sumamente cómoda para los pacientes.
- Inserción rápida, sencilla, segura y **sin estrés**.
- **Se elimina la tos** y el atragantamiento del postoperatorio.
- **Baja resistencia a la respiración en las vías** gracias al gran canal de respiración dentro del dispositivo.
- Sellado de presión de gran calidad que **restringe la fuga de agentes anestésicos volátiles**, mejorando así las condiciones de salud del personal.
- Se adapta a una gran variedad de pacientes, incluyendo braquicéfalos, y de aplicaciones, incluyendo dentales.

Reflujo/regurgitación en perros durante la anestesia

- El reflujo y la regurgitación durante la anestesia es mucho más común de lo que mucha gente piensa, ya que no se ve.
 - Reflujo: 16 a 55% (Raptoulos y Galatos 1997).
 - Regurgitación: 6 a 15% (Wilson *et al.* 2006).
- Consecuencias del reflujo y la regurgitación:
 - Leves: esofagitis en el periodo de recuperación.
 - Graves: contracción esofágica, neumonía por aspiración.
- El canal gástrico en el **v-gel®** se puede usar para detectar y tratar (mediante descarga) el reflujo y la regurgitación.

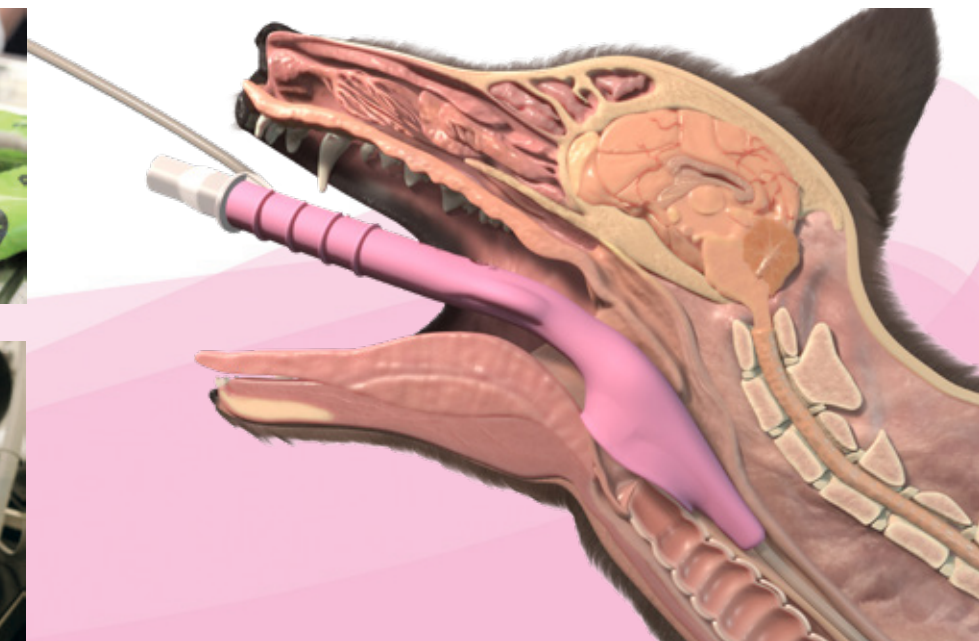

Servicio

CONSULTORÍA

Nuestro sector está experimentando un cambio muy notable. La entrada de fondos de inversión y de empresas multinacionales del sector de las mascotas tienen como objetivo la consolidación, es decir, mediante la adquisición de clínicas veterinarias, formar grandes grupos que les permitan rentabilizar sus inversiones e incrementar el valor de sus empresas. Vender tu clínica a estos grupos es tan válido o lícito como no hacerlo. Tú decides. Pero si tu decisión es seguir siendo propietario, deberás hacer cambios que te permitan posicionar tu negocio en este nuevo marco. Yo puedo ayudarte en este proceso de cambio y adaptación. ¿Cómo? Estas son las áreas en las que te puedo ayudar:

MODELO DE NEGOCIO

- Plan Estratégico
- Definición de Misión, Visión, Valores y Objetivos

RECURSOS HUMANOS

- Organigrama
- Empleados
- Liderazgo y Gestión del Cambio

MARKETING Y VENTAS

- Instalaciones
- Comunicación
- Gestión de Clientes
- Gestión de Proveedores

FINANZAS

- Análisis de Ingresos y Costes
- Inversiones y Amortizaciones
- Búsqueda de Financiación

Si quieres que hablemos, no esperes más, escíbeme a jordi@jordigimeno.com y, sin compromiso, tendremos una primera conversación para analizar tu situación.

Jordi Gimeno

Pet Care & Consulting

Aporto productos de calidad y de valor añadido a precios competitivos. Dispongo de colaboradores comerciales por todo el territorio nacional, pudiendo servir mis productos en menos de 48 horas.

Con el fin de poder mejorar, necesito que me ayudes aportando tu opinión sobre mis productos y servicios. Contáctame en jordi@jordigimeno.com

Puedes ver mi perfil profesional en <http://es.linkedin.com/in/jordigimeno>





Jordi Gimeno

Pet Care & Consulting

Tel. (+34) 637 551 254 · email: jordi@jordigimeno.com · www.jordigimeno.com