



INSTRUCCIONES DE USO

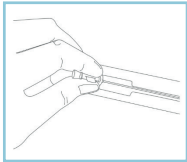

Abrir hasta la línea de puntos
e introducir 3ml de suero fisiológico



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Listo para su uso



Jordi Gimeno
Pet Health & Consulting

jordi@jordigimeno.com
www.jordigimeno.com

Jordi Gimeno

Pet Health & Consulting

SONDA URETRAL GATO CON FIADOR C/TECNOLOGÍA HIDRÓFILA



REVOLUCIONARIO

Al dotar a la sonda de una innovadora tecnología de recubrimiento hidrófilo, hemos logrado una mejora integral tanto en la facilidad de uso para los profesionales del sector veterinario como en la comodidad para los gatos.

FLUYE

El recubrimiento hidrófilo de la superficie de la sonda, cuando se expone a un líquido acuoso, forma una superficie viscosa altamente lubricada, lo que reduce significativamente la fricción entre la sonda y la uretra.

COMPARATIVA

ACCIÓN	SONDA HIDRÓFILA	APLICAR LUBRICANTE A SONDA STANDARD	VENTAJAS	SIGNIFICADO CLÍNICO
Coefficiente de Fricción	0.01-0.03	0.08-0.11	Colocación más suave	Colocación más cómoda evitando traumatismos en la uretra
Tiempo de Activación	<5 SEG.	>10 SEG.	Mayor rapidez de acción	Reducción del tiempo de procedimiento clínico
Tiempo de Secado	8 MINS.	3 MINS.	Lubricación de larga duración	Prácticamente elimina la irritación de la uretra

Jordi Gimeno
Pet Health & Consulting

SONDA URETRAL DE POLIURETANO PARA GATO CON TECNOLOGÍA HIDRÓFILA



- Fabricada con material de poliuretano de grado médico, ofrece una excelente biocompatibilidad, lo que la hace más adecuada para una colocación a largo plazo.
- La sonda es menos propensa a doblarse, más flexible, lo que mejora enormemente la comodidad.
- Incorpora un fiador de acero inoxidable, lo que facilita la inserción.

TALLA	LARGO
3Fr/ 1.0mm	130mm
4Fr/ 1.3mm	130mm

Un diseño verdaderamente amigable con los gatos

Todo el dispositivo está recubierto con un gel protector contra la fricción de retención, lo que reduce significativamente el daño causado por la fricción entre el orificio uretral del gato y los accesorios rígidos debido a la retención de la sonda.



La salida de drenaje utiliza una técnica de apertura en forma de cuña, lo que elimina el riesgo de que las aberturas verticales afiladas provoquen daños en la uretra.



El extremo de inserción es más redondeado en comparación con otros dispositivos sin esta tecnología, facilitando la inserción y reduciendo completamente la irritación.