

OvaCyte™ Pet

Análisis fecal basado en IA y sin complicaciones.

OvaCyte Pet ofrece identificación inmediata de parásitos fecales. Sin complicaciones, la sencilla preparación de la carga de la muestra lleva menos de 2 minutos. Totalmente automatizado, el análisis digital de la muestra con IA permite decidir tratamientos en tiempo real mediante resultados precisos y fiables.

Preparación de la muestra sin complicaciones, sólo cargar y listo

El sistema cerrado y fácil de usar de OvaCyte Pet permite que la muestra esté lista en el analizador en menos de 2 minutos. No hay pesado, maceración ni centrifugación manual aparte, lo que significa que no hay olores ni complicaciones.

Calidad de laboratorio en la clínica

El nuevo y totalmente automatizado método de OvaCyte Pet, junto con el análisis digital basado en IA ofrece resultados precisos y fiables.

Decisiones de tratamiento más rápidas y con mejor información

OvaCyte Pet proporciona resultados rápidos y prácticos durante la consulta, eliminando las dudas del tratamiento. OvaCyte Pet le ayuda a tomar decisiones precisas y rápidas, evitando tratamientos innecesarios.



Resultados prácticos con calidad de laboratorio. En la clínica y en tiempo real.



ANCILOSTÓMIDOS

ASCÁRIDOS

TRICÚRIDOS

PARÁSITO
PULMONARES

COCCIDIOS

NUEVO: TAENIA

GIARDIA*

Canino y felino:
Ancylostoma spp.,
Uncinaria stenocephala

Canino y felino:
Toxascaris leonina
Canino:
Toxocara canis
Felino:
Toxascara cati

Canino:
Trichuris vulpis

Canino y felino:
Capillaria aerophila

Canino y felino:
Cystoisospora spp.

Canino y felino:
Taenia

OvaCyte Pet es tan fácil como A, B, C.




A. Preparación

Nuestra herramienta OvaPrep hace que la preparación de las muestras sea extremadamente sencilla, limpia y rápida, en menos de 2 minutos de su tiempo. Utilice la herramienta para obtener la muestra fecal, no es necesario pesarla. Insértela en el dispositivo, agregue fluido de flotación y recójala con una jeringa. Insértela en el casete.



B. Cargar y listo

Cargue el casete en el OvaCyte Fecal Analyzer e inicie el escaneado. El escaneado, el análisis y el informe están totalmente automatizados. El software de reconocimiento de imágenes basado en IA identifica las especies de parásitos en la biblioteca de imágenes y el número de huevos u ooquistes parasitarios presentes.

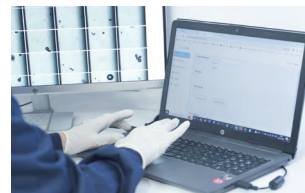

3. Obtener resultados

En pocos minutos, los resultados y todas las imágenes del escaneado estarán disponibles en la aplicación web OvaCyte en su ordenador o teléfono móvil.

Información del producto

Producto	Descripción breve y contenidos	Código de promoción
OvaCyte Pet Fecal Analyzer	Dispositivo compacto con pantalla táctil integrada; incluye cables de alimentación, adaptador de corriente, dispositivo de bloqueo y cable Ethernet	FP20001
OvaCyte Pet Test Kit and OvaPrep	40 x Casetes OvaCyte Pet, 40 x OvaPrep y 1 litro de fluido de flotación OvaCyte Pet	FP24001 (40)
Nuevo: OvaCyte Pet Test Kit	40 x Casetes OvaCyte Pet, 40 x OvaPrep y 1 litro del nuevo fluido de flotación OvaCyte Pet, que incluye detección de Taenia	FP31001 (40)
afosa Giardia Ag Rapid Test	Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección rápida de antígenos de <i>Giardia</i> en heces de perros o gatos	AF8210135 (10)
afosa CCV/CPV/Giardia Ag Rapid Test	Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección de <i>Coronavirus Canino</i> (CCV), <i>Parvovirus Canino</i> (CPV), y antígenos de <i>Giardia</i> en heces de perros	AF8210333 (5)

*Los productos no están diseñados para el diagnóstico, la prevención o el tratamiento de una enfermedad.

Experimente el análisis fecal sin complicaciones



Escanee el código QR para saber más sobre OvaCyte Pet, concertar una demostración o recibir nuestra exclusiva oferta inicial.

Póngase en contacto con nuestros especialistas: www.indical.com

E-mail: rosa.oliveira@indical.com | Teléfono: +34 647 589 423

Conecte con nosotros en LinkedIn: www.linkedin.com/company/indical

Los productos no están diseñados para el diagnóstico, la prevención o el tratamiento de una enfermedad. Para obtener información actualizada sobre licencias y el descargo de responsabilidad específico del producto, consulte el respectivo folleto o manual de usuario. Los requisitos reglamentarios varían según el país, es posible que los productos no estén disponibles en su zona geográfica. Marcas comerciales: INDICAL® (INDICAL BIOSCIENCE GmbH); OvaCyte™ (Telenostic Ltd.). Los nombres, marcas comerciales, etc. que están registrados y se utilizan en este documento, incluso cuando no estén marcados específicamente como tales, no se pueden considerar desprotegidos por la ley. Las imágenes del producto pueden diferir del producto real. INFLY-OvaCyte-Pet-ESP-250512 © 2025 INDICAL BIOSCIENCE

INDICAL
BIOSCIENCE

INDICAL BIOSCIENCE GmbH
Deutscher Platz 5b
04103 Leipzig, Alemania