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


INSTRUCCIONES DE USO

- Abrir el envase, no desecharlo ya que lo utilizaremos posteriormente, y retirar la sonda.
- Retirar la funda de plástico de la sonda y colocar de nuevo ésta en el envase.
- Apretar los sobres de agua estéril dentro del envase para romperlos y agitar para asegurar que la sonda esté completamente expuesta al agua estéril.
- Retirar de nuevo la sonda del envase y continuar con el procedimiento habitual de sondaje.



Jordi Gimeno

Pet Health & Consulting

jordi@jordigimeno.com

www.jordigimeno.com

Jordi Gimeno

Pet Health & Consulting

SONDA URETRAL FOLEY CON FIADOR

C/TECNOLOGÍA HIDRÓFILA



REVOLUCIONARIO

Al dotar a la sonda de una innovadora tecnología de recubrimiento hidrófilo, hemos logrado una mejora integral tanto en la facilidad de uso para los profesionales del sector veterinario como en la comodidad para los perros.

FLUYE

El recubrimiento hidrófilo de la superficie de la sonda, cuando se expone a un líquido acuoso, forma una superficie viscosa altamente lubricada, lo que reduce significativamente la fricción entre la sonda y la uretra.

COMPARATIVA

ACCIÓN	SONDA HIDRÓFILA	APLICAR LUBRICANTE A SONDA STANDARD	VENTAJAS	SIGNIFICADO CLÍNICO
Coeficiente de Fricción	0.01-0.03	0.08-0.11	Colocación más suave	Colocación más cómoda evitando traumatismos en la uretra
Tiempo de Activación	<5 SEG.	>10 SEG.	Mayor rapidez de acción	Reducción del tiempo de procedimiento clínico
Tiempo de Secado	8 MINS.	3 MINS.	Lubricación de larga duración	Prácticamente elimina la irritación de la uretra

Jordi Gimeno

Pet Health & Consulting

SONDA URETRAL FOLEY CON TECNOLOGÍA HIDRÓFILA



- Fabricada en silicona de uso médico, alto confort y biocompatibilidad.
- Apta para una colocación de larga duración (hasta 28 días).
- Visible a los RX en su totalidad.
- Longitudes: 550mm/700mm/700mm.

TALLA	BALÓN
6Fr	3ml
8Fr	3-5ml
10Fr	3-5ml

