



Instrucciones de uso

Le felicitamos por utilizar v-gel®, el mejor producto para la gestión segura de las vías respiratorias durante la anestesia y reanimación de pacientes veterinarios.



v-gel® para gatos: GARANTÍA DEL PRODUCTO y LIMITACIONES DE ESTA


General: es necesario que los usuarios de los productos v-gel® para gatos se familiaricen con estas instrucciones. Puede acceder a más información detallada y vídeos de formación en nuestra página web en www.docsinnovent.com.

Importante: los usuarios deben seguir las recomendaciones relativas al manejo y el uso de cada producto v-gel® para gatos. El producto está diseñado para ser utilizado una única vez, tras la cual se debe desechar. Docsinnovent® y su proveedor no aceptará ninguna responsabilidad en los casos en los que un usuario haya incumplido algún aspecto incluido en estas recomendaciones o cuando se haya superado la fecha de uso.


Garantías, condiciones y limitaciones:

1. Docsinnovent Limited garantiza que los productos v-gel® para gatos (a) cumplen con las especificaciones publicadas por Docsinnovent, (b) están libres de efectos de fabricación y (c) son adecuados para su uso y propósito pretendido.
2. Los usuarios que aleguen un fallo del producto durante su uso deben comunicar dicho fallo por escrito a su proveedor inmediatamente después de su descubrimiento. Su proveedor o Docsinnovent requerirá al usuario que alegue un fallo del producto que especifique los detalles de la reclamación y certifique el cumplimiento de todos los aspectos de las recomendaciones de uso establecidas a continuación. El producto debe estar disponible para su envío y análisis.
3. En el caso de aceptar una reclamación, su proveedor sustituirá normalmente el producto de manera gratuita o, como alternativa a esta opción, le reembolsará el coste del producto.
4. Es posible que se solicite la devolución del producto objeto de la reclamación a su proveedor.
5. La responsabilidad de Docsinnovent y su proveedor respecto de cualquier reclamación estará limitada al precio de venta del producto y los posibles franqueros y reembolsos, y no asumirán ninguna responsabilidad en ninguna circunstancia por pérdidas consecuenciales ni por daños o pérdidas de beneficios en relación con ninguna reclamación.

V-gel® para gatos Guía de tamaños	Tamaño	Peso corporal ideal del gato	Código de producto	NOTA
<p>Esta tabla solo pretende ser una guía.</p> <p>El tamaño correcto del v-gel® debe ser determinado por el peso corporal ideal del paciente.</p>	C0	0,5 – 1 kg. (1 – 2 lb.)	D40000	<p>Estas instrucciones son solo una guía. No pretenden sustituir las prácticas clínicas empleadas habitualmente ni las de los profesionales veterinarios. Debe llevarse a cabo una evaluación de riesgos y seleccionar el producto cuando se trabaje con pacientes con problemas en las vías respiratorias.</p>
	C1	1 – 2 kg. (2 – 4,5 lb.)	D40001	
	C2	1,5 – 3,5 kg. (3 – 8 lb.)	D40002	
	C3	3 – 5 kg. (6,5 – 11 lb.)	D40003	
	C4	4,5 – 6 kg. (10 – 13 lb.)	D40004	
	C5	> 5,5 kg. (> 12 lb.)	D40005	

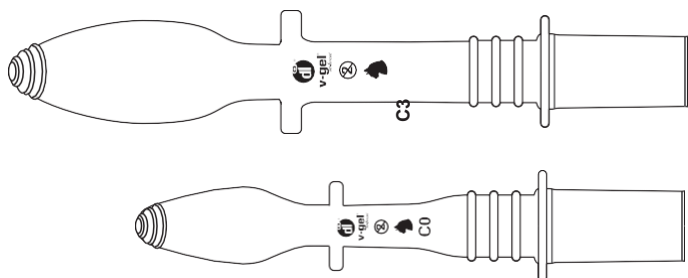


- 1 Seleccione el tamaño correcto para el gato de acuerdo con la tabla de tamaños anterior. Confirme el tamaño correcto antes de la inserción midiendo el producto con el paciente como referencia.

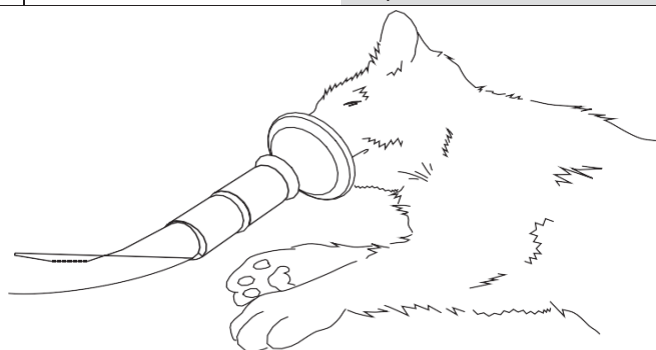

- 2 Asegúrese de que el paciente está previamente oxigenado y después totalmente anestesiado (mandíbula relajada, sin reflejos). Puede que sea necesario aplicar una dosis apropiada de anestésico tópico local en la laringe, dependiendo de la valoración del profesional.




- 3 Aparte la lengua o utilice un laringoscopio para examinar la boca y la faringe del paciente. Retire cualquier material externo y succione cualquier exceso de secreciones que pueda observar.

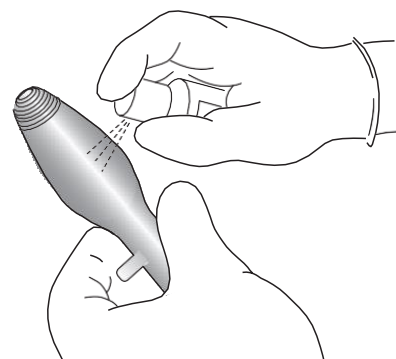

- 4 Lubrique el v-gel® con Vetube® o un lubricante similar con base de agua. Agite bien la botella y asegúrese de que las superficies externas del v-gel® estén cubiertas con lubricante, sin obstruir el canal de las vías respiratorias.




5 Sujetando la lengua del paciente, inserte el v-gel® avanzando suavemente desde el paladar con el canal de las vías respiratorias abierto y orientado ventralmente hacia la lengua.

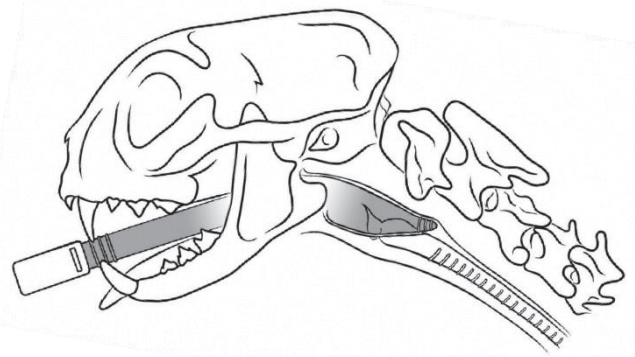


6 Haga avanzar suavemente el v-gel® en la faringe. Sentirá como el v-gel® se coloca en su posición.

7 El v-gel® debería encajar en su sitio sin posibilidad

de rotar. La confirmación de la correcta colocación debe determinarse probando de forma patente las vías respiratorias (por ejemplo, con un capnógrafo, una ventilación suave de presión positiva o un monitor de respiración).

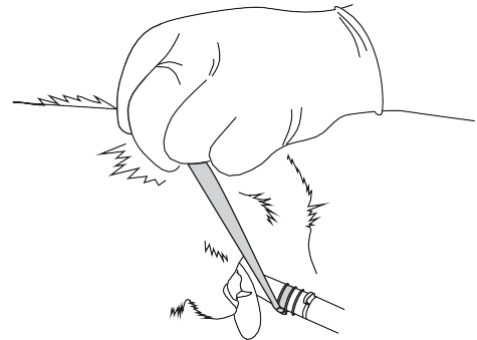

8 El v-gel® se debe fijar atando una tira de gasa alrededor de las marcas anilladas del dispositivo o del propio conector y a la parte trasera de la cabeza del paciente, evitando así el movimiento rostral del v-gel®. El v-gel® se debe desconectar del circuito cuando se esté recolocando o rotando al paciente.

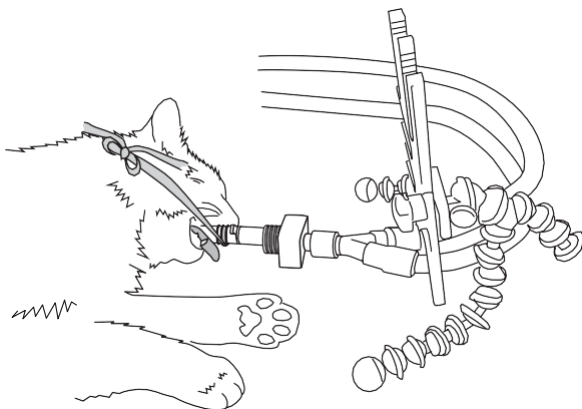

9 Una vez se haya fijado el v-gel®, el peso del circuito anestésico debe quedar soportado. El soporte de tubos d-grip® es un dispositivo ideal para ayudar a lograrlo.




10 Una vez completado el procedimiento, deje que el gato se recupere mientras está conectado a una fuente de oxígeno. La gasa se puede desatar de la cabeza del gato.

11

Una vez hayan vuelto los reflejos normales (como el tragar o el movimiento de las orejas), retire el v-gel® sacándolo suavemente de la boca. Compruebe y retire cualquier secreción oral o faríngea que pueda bloquear las vías respiratorias tras retirar el v-gel®.

Recicle o deseche el v-gel® de acuerdo con la reglamentación local.

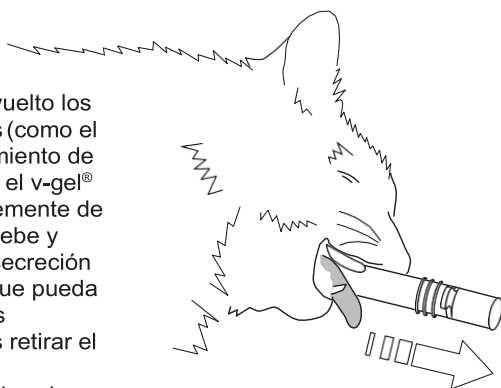

Los dispositivos v-gel® están disponibles también para conejos



Diseñado, desarrollado y fabricado en el Reino Unido

IMPORTADO y DISTRIBUIDO por:

JGLOBAL2013,S.L.

c/ Autonomía de Aragón, s/n 22700 Jaca (Huesca)
Tel: 637.55.12.54 Email: info@jglobal.com.es